
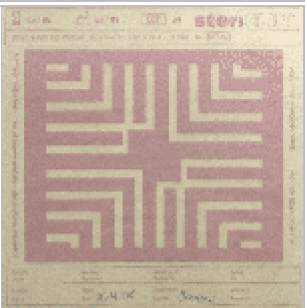



Autoclave	Bowie-Dick Test																		
	<ul style="list-style-type: none"> Chargez l'autoclave avec une panier dans laquelle vous avez placé une paquet Bowie-Dick et l'introduisez dans l'appareil au milieu Exécutez un cycle de stérilisation 																		
	<ul style="list-style-type: none"> Après le cycle vérifiez si tous les feuilles ainsi le point de la première feuille sont devenus bien rose. 																		
	<ul style="list-style-type: none"> Collez la première feuille ainsi une du milieu du paquet dans le classeur des protocoles autoclave Marquez la date du test 																		
	<ul style="list-style-type: none"> Si le résultat est mauvais, contactez soit le fournisseur Heiland : <table border="1" data-bbox="727 1081 1155 1411"> <tr> <td colspan="2">Heiland Schweiz AG</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gewerbestrasse 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3421 Lyssach b. Burgdorf</td> </tr> <tr> <td>Tel.:</td> <td>+41 (0)34 448 11 20</td> </tr> <tr> <td>Fax:</td> <td>+41 (0)34 448 11 30</td> </tr> <tr> <td>Gratisfax:</td> <td>0800 88 11 40</td> </tr> <tr> <td>E-Mail:</td> <td>info@heiland.ch</td> </tr> <tr> <td>Homepage:</td> <td>www.heiland.ch</td> </tr> </table> soit le fabriquant Melag : <table border="1" data-bbox="574 1570 1310 1749"> <tr> <td>MELAG Technique médicale Geneststraße 9 - 10 10829 Berlin Germany</td> <td>email: info@melag.de Tél: + 49 30 - 7579 11-0 Tax: +49 (0) 30 - 75 100 33</td> </tr> </table> 	Heiland Schweiz AG		Gewerbestrasse 1		3421 Lyssach b. Burgdorf		Tel.:	+41 (0)34 448 11 20	Fax:	+41 (0)34 448 11 30	Gratisfax:	0800 88 11 40	E-Mail:	info@heiland.ch	Homepage:	www.heiland.ch	MELAG Technique médicale Geneststraße 9 - 10 10829 Berlin Germany	email: info@melag.de Tél: + 49 30 - 7579 11-0 Tax: +49 (0) 30 - 75 100 33
Heiland Schweiz AG																			
Gewerbestrasse 1																			
3421 Lyssach b. Burgdorf																			
Tel.:	+41 (0)34 448 11 20																		
Fax:	+41 (0)34 448 11 30																		
Gratisfax:	0800 88 11 40																		
E-Mail:	info@heiland.ch																		
Homepage:	www.heiland.ch																		
MELAG Technique médicale Geneststraße 9 - 10 10829 Berlin Germany	email: info@melag.de Tél: + 49 30 - 7579 11-0 Tax: +49 (0) 30 - 75 100 33																		
<p> Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF</p>																			