

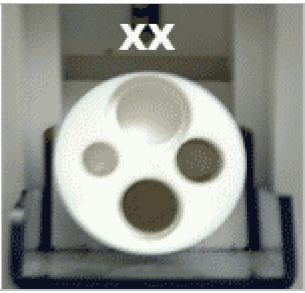

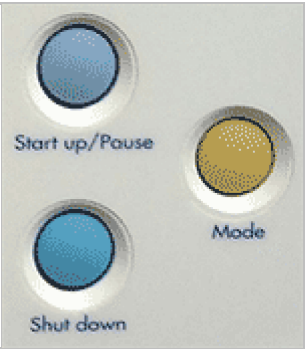
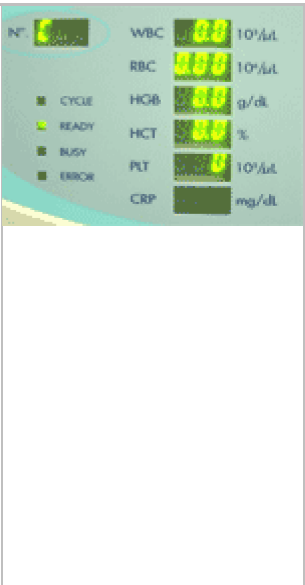



ABX Micros CRP	Contrôle Journalier	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Déchets : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minitrol sang de contrôle : traiter comme déchets médicaux ▪ Date de péremption : suivant l'emballage. ▪ Enlevez le Minitrol sang de contrôle du frigo 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placez la bouteille sur le rouleur et le laissez revenir à la température ambiante ▪ Mettez l'appareil en marche ▪ Temps d'attente environ égal au temps de démarrage de l'appareil 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tournez le barillet en position XX ▪ Ouvrez le flacon et placez le dans la position XX 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez 1x le bouton Mode, l'appareil est mise en fonction sans CRP 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez 2x le bouton Mode pour mettre l'appareil est en fonction Contrôle. L'indication CRP sera éteinte ▪ Fermer le barillet afin de déclencher le processus de contrôle ▪ Après ré-ouverture du barillet, <ul style="list-style-type: none"> ○ Enlever le flacon, ○ Bien nettoyer le bouchon et le flacon ○ Fermez le flacon et rangez le dans le frigo ▪ À la fin du processus de contrôle, comparer les résultats imprimés avec le protocole fourni avec la livraison du Minitrol sang de contrôle ▪ Classer les résultats imprimés dans le classeur rouge : Protocoles Hématologie ▪ En cas d'erreur dans les résultats : <ul style="list-style-type: none"> ○ Exécutez une calibration <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sans résultat positive, contactez Axon Lab 	
 Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF		