

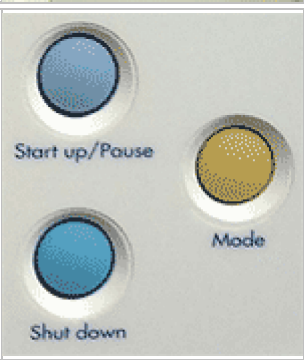




<p>ABX Micros CRP</p>	<p style="text-align: right;"><u>Marche</u></p>
	<ul style="list-style-type: none"> • À la réception, marquez la date de réception afin d'observer le temps de vie de 2 mois • Date de péremption : suivant l’emballage • Déchets : traiter comme déchets médicaux
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enlevez les 3 réactifs du frigo et mettez les en place dans le minifridge de l’appareil ▪ Rangez les bouchons dans l'emballage et placez l'emballage dans le frigo
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettez l'appareil en marche - interrupteur gauche à 1 ▪ Mettez l'imprimante en marche - interrupteur gauche à 1 (uniquement la première fois) ▪ Le cycle de démarrage commence et l'appareil va se trouver en état de fonction ▪ Si besoin exécutez le contrôle journalier ▪ Après un certain temps de non utilisation l'appareil se place en état de veille ▪ Pour le réveiller, appuyez le bouton Start-up/Pause
<p>ABX Micros CRP</p>	<p style="text-align: right;"><u>Arrêter</u></p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer le bouton Start-up/Pause afin de réveiller l'appareil et attendez ▪ En suite, appuyez le bouton Shut down pour lancer le processus ▪ Dès terminé, la couverture du minifridge s'ouvre ▪ Enlevez les 3 réactifs, placez les bouchons et rangez les dans l'emballage dans le frigo ▪ Appuyez le bouton Shut down pour fermer la couverture du minifridge et fermez la porte ▪ Mettez l'appareil en arrêt - interrupteur gauche à 0
	<p>Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF</p>