


<b>Radiologie</b>	<b>Contrôle de Stabilité</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lors de l'observation des films durant le contrôle de stabilité, comparez l'échelon avec celui de la semaine précédente                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le noircissement correspond, tout est OK</li> <li>○ Si on remarque un décalage de ton dans la zone centrale de l'échelon, il faut remédier en changeant le bain de révélateur, mais uniquement le contenu de la cuve, pas le bac principal!</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Après chaque radio, ne pas oublier de tout noter dans le livre de contrôle</li> <li>▪ Idem après chaque contrôle de stabilité</li> </ul>
 Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF	