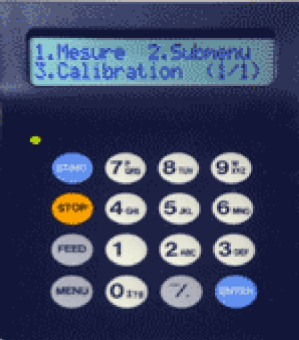


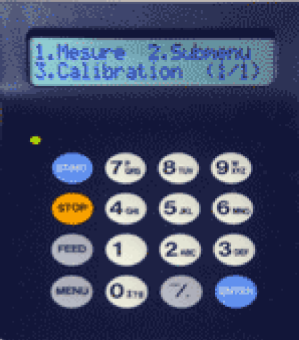




Spotchem EZ	Calibration
	<p style="text-align: center;">À l'ouverture de n'importe quelle emballage de bandelettes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sur le clavier appuyez la touche 3 pour sélectionner le fonction Calibration
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enlevez la carte de calibration de l'emballage de bandelettes ▪ La carte est pourvue de 4 voies, 2 voies par côté
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chaque voie doit passer 2 fois dans la station de lecture de gauche à droite ▪ 2 fois, c'est à dire : <ul style="list-style-type: none"> ○ 2x trace 1, 2x trace 2, 2x trace 3, 2x trace 4 ▪ Sortez de la fonction Calibration en appuyant 2x la touche Stop ▪ Conservez les cartes pour la durée de l'utilisation de l'emballage de bandelettes
Spotchem EL	Calibration
	<p style="text-align: center;">À l'ouverture de n'importe quelle emballage de plaquettes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sur le clavier appuyez la touche 3 pour sélectionner le fonction Calibration
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enlevez la carte de calibration de l'emballage de plaquettes ▪ La carte est pourvue de 1 voie
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chaque voie doit passer 2 fois dans la station de lecture de l'arrière vers l'avant ▪ 2 fois, c'est à dire 2 x trace 1 ▪ Sortez de la fonction Calibration en appuyant 2x la touche Stop ▪ Conservez les cartes pour la durée de l'utilisation de l'emballage de plaquettes



Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF